

Ab sofort verfügbar!

DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test



Wir freuen uns, unser Produktportfolio ab sofort mit dem DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test in Vertriebskooperation mit Devidia (Weimar) zu ergänzen. DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test ist ein schneller chromatographischer Immunoassay zur Detektion von SARS-CoV-2 Antigenen in Nasopharyngeal-abstrichproben.

Produkthighlights

- In **Deutschland** entwickelt und hergestellt
- **Einfache** Anwendung
- **hohe Sensitivität und Spezifität**
- **Schnelles** Testergebnis nach 15 Minuten
- Nur für die **professionelle** In-Vitro-Diagnostik vorgesehen
- Keine zusätzliche Ausstattung nötig
- **Ortsunabhängig** durchführbar



Spezifikationen

Assay Format	Chromatographischer Immunoassay
Test Typ	Qualitativ
Instrument	Gerätefrei
Probenmaterial	Nasopharyngeal Abstrich
Ziel Antigen	Nucleocapsid
Auslesezeit	15 Minuten*
Spezifität	99,5%
Sensitivität	96,5%
Lagertemperatur	2-30°C
Packungsgröße	20 Stk / 100 Stk


*keine Interpretation nach 20 Minuten

Kit-Komponenten

- Testkassetten
- Sterile Tupfer
- Extraktionsröhrchen mit Extraktionspuffer
- Arbeitsstation
- Gebrauchsanweisung


Testabarbeitung

Probenentnahme im hinteren Nasopharynx

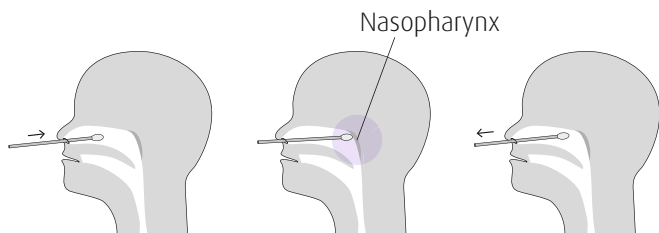


- 1) Führen Sie den mitgelieferten sterilen Tupfer in das Nasenloch ein, bis Sie die Oberfläche des hinteren Nasopharynx erreichen
- 2) Fahren Sie mit dem Tupfer über die Oberfläche des hinteren Nasopharynx
- 3) Ziehen Sie den sterilen Tupfer aus der Nasenhöhle

Probenvorbereitung

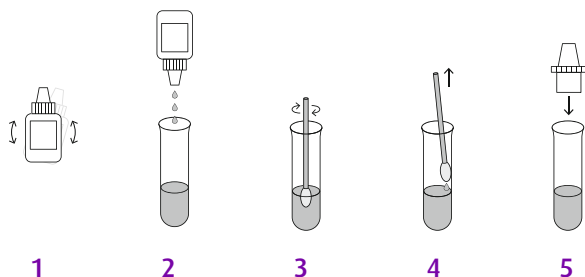

- 1) Schütteln
- 2) Ca. 10 Tropfen oder den kompletten Inhalt aus dem Einzeldropper hinzufügen
- 3) Drehen 10-15x
- 4) Entfernen Sie den Tupfer. Während Sie ihn entfernen am Rand ausdrücken
- 5) Bringen Sie die Tropferspitze oben auf dem Extraktionsröhrchen an

Probenzugabe und Interpretation der Ergebnisse

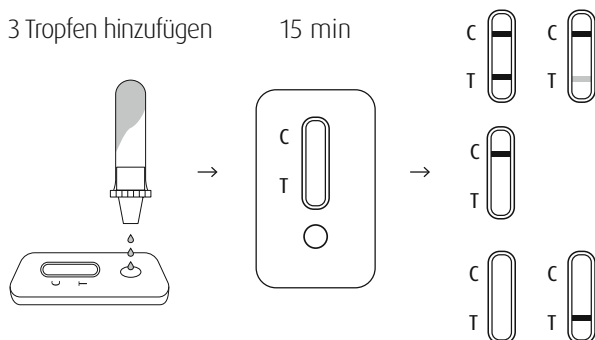

Positiv: Es erscheinen zwei deutlich ausgeprägte farbige Linien

Negativ: Eine farbige Linie erscheint im Kontrollbereich (C). Keine sichtbare farbige Linie erscheint im Testbereich (T)

Ungültig: Es erscheint keine Kontrolllinie

Leistungsmerkmale

DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test		RT-PCR		Gesamt
		Positiv	Negativ	
COVID-19 Antigen	Positiv	166	1	167
	Negativ	6	199	205
Gesamt		172	200	372
Relative Sensitivität		96,5% (95%-KI*: 92,6%~98,7%)		
Relative Spezifität		99,5% (95%-KI*: 97,2%~99,7%)		
Genauigkeit		98,1% (95%-KI*: 96,2%~99,2%)		

* Konfidenzintervalle

→ Bestellen Sie jetzt unter diagnostics@virion-serion.de

Produkt	Anzahl	Bestell-Nr.
DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test	20 Stk	DV2.30.1.157
	100 Stk	DV2.30.1.158

Ihr Vertriebspartner:

Institut Virion\Serion GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 19, 97076 Würzburg, Germany

Phone +49 931 3045 0 Fax +49 931 3045 100

Mail info@serion-diagnostics.de Web www.serion-diagnostics.de

virion\serion